

AESCULAP® STERILCONTAINER FUNKTIONSPRÜFUNG

BASIS STERILCONTAINER

Alle Bestandteile des Sterilcontainers sind vor jedem Einsatz visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion zu prüfen. Für den sicheren Einsatz ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung C48381 zwingend notwendig. Falls Ihnen die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an Aesculap.

1. METALLTEILE NICHT VERFORMT



- Containerwanne und Deckel überprüfen



- Keine Dellen im Wannenrand




- Keine Dellen im Deckelrand
- Aluminiumdeckel nicht verzogen

2. FILTERHALTER PRÜFEN



- Die Filterhalterung hat eine Vorspannung und liegt vollflächig am Rand auf

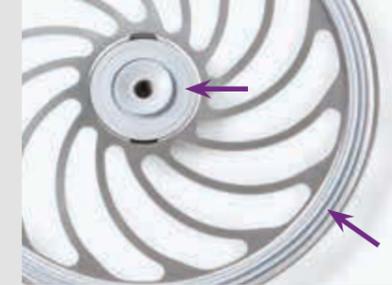

- Dichtung ist vorhanden und unversehrt




- Bolzen im Deckel und ggf. Wanne wackeln nicht

3. UNVERSEHRTE DICHTUNGEN



- Dichtungen sind vorhanden und unversehrt
- Keine Risse, Brüche, usw.

4. FILTERINSPEKTION

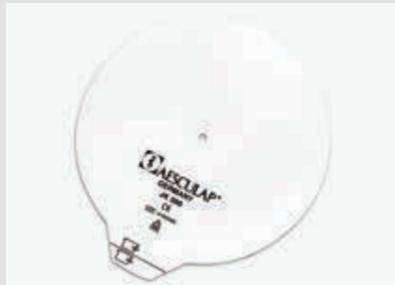

- Filter unbeschädigt (keine Knicke, Löcher, Risse oder Spalten)
- Einmalfilter gewechselt (intakt)



- Die Filterhalterung rastet deutlich ein

5. FUNKTIONSTÜCHTIGER VERSCHLUSS



- Der Verschluss ist funktionstüchtig und weist keine Beschädigungen auf
- Verschlusscharniere gelegentlich mit Sterilit® I ölen (JG600)



6. RICHTIGE DECKELSCHLIESSUNG



- Deckel und Wanne justieren ohne Druck

7. UNVERSEHRTE TRAGEGRIFFE



- Verschluss des Deckels rastet hörbar in das Gegenstück an der Wanne ein



- Tragegriffe sind unversehrt und zeigen keine Beschädigungen auf

8. UNBESCHÄDIGTE STERILCONTAINER 9. KENNZEICHNEN UND VERPLOMBEN



- Nur unbeschädigte Sterilcontainer verwenden
- Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen oder reparieren (Aesculap Technischer Service)



- Sterilcontainer verschlossen



- Wahlweise mit Produktionsetikett verplombt oder Produktionsetikett und Kunststoffplombe angebracht

AESCULAP® STERILCONTAINER FUNKTIONSPRÜFUNG

PrimeLine STERILCONTAINER

Alle Bestandteile des Sterilcontainers sind vor jedem Einsatz visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion zu prüfen. Für den sicheren Einsatz ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung C48381 zwingend notwendig. Falls Ihnen die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an Aesculap.

1. METALLTEILE NICHT VERFORMT



- Containerwanne und Deckel überprüfen



- Keine Dellen im Wannenrand

2. UNVERSEHRTE DICHTUNGEN



- Dichtungen sind vorhanden und unversehrt
- Keine Risse, Brüche, usw.

3. EINWANDFREIE KUNSTSTOFFTEILE



- Kunststoffteile unbeschädigt, keine losen Teile
- Kunststoffdeckel beidseitig auf Risse prüfen




4. FILTERINSPEKTION



- Lamellenplatte zur Überprüfung abnehmen (Drehbewegung)



- Primeline Filter unbeschädigt (keine Knicke, Löcher, Risse oder Spalten)
- Filter bleibt bei der Überprüfung in der Kartusche

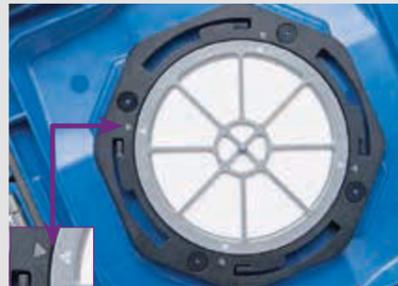

- Dreiecke zeigen zueinander (eingerstet)



- Der Verschluss ist funktionstüchtig und weist keine Beschädigungen auf
- Verschlusscharniere gelegentlich mit Sterilit® I ölen (JG600)



6. RICHTIGE DECKELSCHLIESSUNG



- Deckel und Wanne justieren ohne Druck



- Verschluss des Deckels rastet hörbar in das Gegenstück an der Wanne ein

7. UNVERSEHRTE TRAGEGRIFFE



- Tragegriffe sind unversehrt und zeigen keine Beschädigungen auf

8. UNBESCHÄDIGTE STERILCONTAINER



- Nur unbeschädigte Sterilcontainer verwenden
- Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen oder reparieren (Aesculap Technischer Service)

9. KENNZEICHNEN UND VERPLOMBEN



- Sterilcontainer verschlossen
- Wahlweise mit Produktionsetikett verplombt oder Produktionsetikett und Kunststoffplombe angebracht

