

AESCULAP Aicon® STERILCONTAINER

FUNKTIONSPRÜFUNG

Alle Bestandteile des Sterilcontainers sind vor jedem Einsatz visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion zu prüfen. Für eine korrekte Funktion ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung TA015495-DE zwingend notwendig. Falls Ihnen die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an AESCULAP®.


1. DECKEL PRÜFEN



Keine Dellen, Deckel nicht verformt.




Dichtungen sind vorhanden und unversehrt.

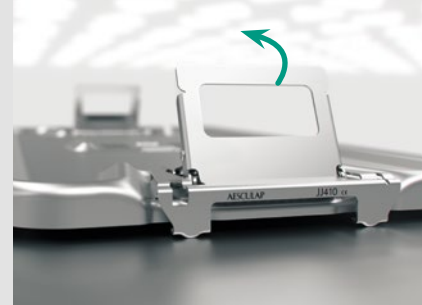

Verschluss voll funktionsfähig.


2. FILTERHALTER PRÜFEN

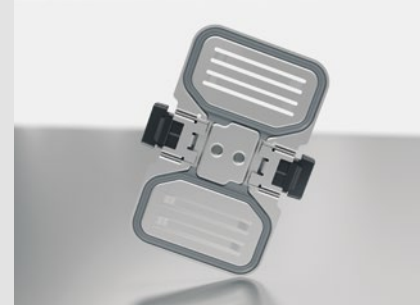

Keine Dellen und/oder Verformungen.



Dichtung vorhanden und unversehrt.

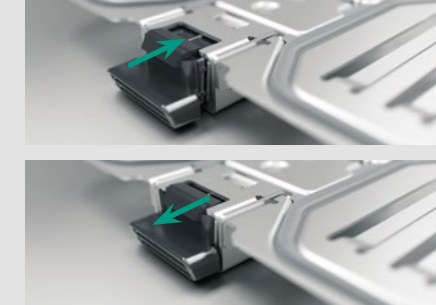

Druckknopf voll funktionsfähig.

3. WANNE PRÜFEN



Neuen Filter einlegen (keine Knicke, Löcher, Risse).



Filterhalter rastet hörbar ein und liegt vollflächig auf.




Keine Dellen, Wanne nicht verformt.



Wannenrand: keine Dellen, nicht verformt.



Kondensatausleitungen zur Überprüfung herausnehmen.

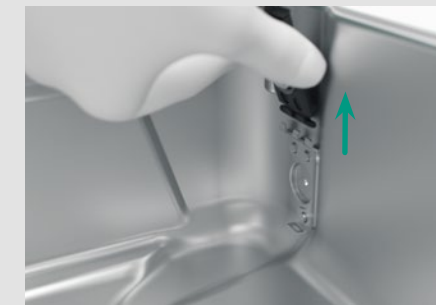


4. AKTIVES TROCKNUNGSSYSTEM (EDS) PRÜFEN



Kondensatausleitungen unbeschädigt. Dichtungen sind vorhanden (Gehäuse und Balg) und unversehrt.



Kondensatausleitungen wieder einsetzen (rasten hörbar ein).

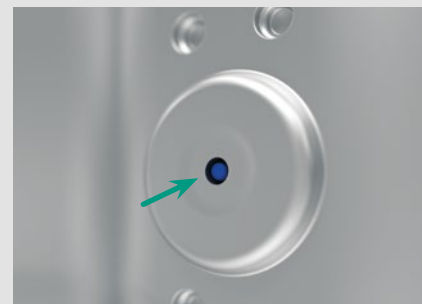

Der blaue Punkt zeigt von außen an, dass die Kondensatausleitung eingesetzt ist.

5. STERILCONTAINER EINSATZBEREIT



Sterilcontainer schließen und verplomben. Nur unbeschädigte Sterilcontainer verwenden. Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen oder reparieren (Aesculap Technischer Service).



Sterilcontainer einsatzbereit.

AUCH ALS VIDEOCLIP VERFÜGBAR



Wie wird der Funktionstest durchgeführt? Code scannen und kurzen Video Clip anschauen.